

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

KBMニトリルグローブ

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は合成ゴム製のパウダーなし、未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋です。
- SS、S、M、L の 4 サイズです。

【 使用目的又は効果 】

- 手術を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋です。歯科用手袋を除きます。

【 使用方法等 】

- 開封口より手袋を取り出し使用してください。
- 手袋は左右兼用型です。

【 使用上の注意 】

重要な基本的注意

- 複数の患者に使用しないでください。
- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす可能性があります。異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないでください。
- 爪先・刃物等 尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがありますので注意してください。
- 本品は薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので注意し使用してください。

【 保管方法及び有効期間等 】

1、保管方法

- 水ぬれ、直射日光、紫外線、オゾン、高温・多湿を避け清潔な場所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）