

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット 35079001
滅菌ピンセット

【禁忌・禁止】

- 体内に留置しないでください。
- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となりますので絶対に行わないでください。
- 電気メスと直接接触させないでください。[火傷や感電の恐れがあります。]
- 再使用の場合は、【保守・点検に係る事項】に従って処理してください。又、滅菌して使用する場合は、プラスチック製のものはEOG滅菌を、鋼製のものは高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、EOG滅菌を使用してください。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は把持部と保持部により構成されたプラスチック製又は鋼製の滅菌済みのものです。

【使用目的又は効果】

- 保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ手術器具をいいます。ハンドルは永久的に結合しています。この器具のグループには、すべての手術用ピンセット、マイクロピンセット及び手術用ツイーザーが含まれます。

【使用方法等】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。
- 創傷面に再使用する場合は滅菌したものを使用してください。

【使用上の注意】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封されていたものは滅菌状態を維持できていませんので、創傷面には使用しないでください。
- 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬してください。
- 鋼製のものは、塩素系及びヨウ素系の消毒剤の使用により、腐食の原因になりますので、出来るだけ使用をさけてください。
- 廃棄する場合は、医療廃棄物として注意して処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1、保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

2、使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・消毒をしてください。
- 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）で洗浄するときには、機器同士が接触し損傷することがないように注意してください。また、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納してください。プラスチック製のものは損傷しやすいので特に注意してください。
- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用してください。
- 強アルカリ性洗剤・強酸性洗剤は、機器を腐食させるおそれがありますので使用をさけてください。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないでください。
- 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをしてください。仕上げすすぎには、浄化水（濾過水、蒸留水、脱イオン化水等）を用いることを推奨します。
- 洗浄後は直ちに乾燥してください。
- 滅菌の際には必ず洗浄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）