

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラスⅠ処置キット 33961001
処 置 セ ッ ト Ⅰ

再使用禁止

※【警告】

ドレープ、ラミドレープ

- 可燃性消毒薬をご使用の際は、消毒用アルコール等を拭き取り、または気化拡散させてから本品を使用すること。[電気メス等のご使用の際、気化したアルコール蒸気の濃度により、引火することもある。]

※【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
 - 体内に留置しないこと。
- ピンセット、鉗子、ハサミ、持針器
[使用方法]
- 電気メスと直接接触させないこと。[火傷や感電の恐れがある。]
- ラテックスグローブ
[適用対象（医療関係者、患者）]
- 今までにアナフィラキシー症状の経験がある医療関係者及び患者には使用しないこと。
- ステリドレープ
- プラスチックドレープを介して除細動をかけないこと。
[分流がおきたり、除細動の効果が不十分になる可能性がある。]
 - ヨウ素化合物含有の切開用フィルムドレープが同梱されている場合は、ヨウ素に過敏性が判明している患者に使用しないこと。[ヨウ素過敏症を発症する恐れがある。]
- ドレープ
- ヨウ素化合物含有の切開用フィルムドレープが同梱されている場合は、ヨウ素に過敏性が判明している患者に使用しないこと。[ヨウ素過敏症を発症する恐れがある。]
 - 天然ゴムを使用した伸縮シートが使用されているドレープを天然ゴムアレルギー患者には使用しないこと。[アレルギー性症状を起こす恐れがある。]
- テガダーム
[使用方法]
- 感染したカテーテル穿刺部位や創には使用しないこと。
[感染を増悪させる恐れがある。]
- チューブクランプ
[使用方法]
- 直径1～8mm以内、且つ、肉厚が1mm以下の軟質のチューブ以外には使用しないこと。[チューブを遮断したり、摘んだりすることができない恐れがある。]

※【形状・構造及び原理等】

- 本品は各種医療機器等のうち、二品目以上の構成を組み合わせて構成する組み合わせ医療機器を滅菌したものである。
- 構成品の名称及び数量は、構成表又は表示ラベルに記載している。

ラテックスグローブ

- 本品は天然ゴムを使用している。

【使用目的又は効果】

- 一般的な処置を行うために必要なクラスⅠの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットである。本品は単回使用である。

※【使用方法等】

- 開封して適宜使用する。
- 使用前は各構成品の情報について、それぞれの添付文書や取扱説明書を参照する。
- 各構成品は、医師の判断のもと、実施する手術、手技の手順に沿って、各構成品の使用方法、効果の範囲にて使用する。

※【使用上の注意】

＜使用注意＞

ラテックスグローブ

- 天然ゴムと接触する機会の多い方は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

＜重要な基本的注意＞

ガーゼ、デクーゼ、セミデクーゼ、タンポンガーゼ、ケーパイン、水都

- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるため、注意して使用すること。

ステリドレープ

- 本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。
- 高齢患者などで皮膚が脆弱な場合、粘着材使用製品の貼付時・剥離時には、特段の配慮が必要です。特に皮膚に緊張をかけないよう注意すること。皮膚が引っ張られて炎症を起こすことがある。

ステリストリップ

- 傷が感染している兆候（膿がでている、発赤、発熱、腫れ、悪臭など）を呈していないか、また、本品を貼付している部位およびその周辺の皮膚に異常（腫れ、水疱、発赤、発疹、ただれ、痒み、毛包炎など）が現れていないかを確認するために頻繁に傷を観察すること。
- 貼付部および傷に異常を認めた場合や、治療上の必要がある場合を除き、本品が剥がれてくるまで、あるいは傷がしっかりと閉鎖するまで貼りつけてもかまわない。
- 傷が汚れたり濡れたりしないように、必要に応じ、ガーゼや救急絆創膏などで傷を覆うこと。
- 本品の上から被覆しているガーゼなどのドレッシング材を交換するときには、本品を剥がさないように注意すること。
- 傷の消毒は必要最小限に控えること。不必要な消毒は傷の治癒の遅延につながる可能性がある。

ラテックスグローブ、ニトリルグローブ

- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす可能性がある。異常を感じたら直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
- 爪先・刃物等 尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるため注意すること。

綿棒

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・綿体に直接手をふれないこと。

シーツ

- ・ラミネート面を下側にして使用すること。

<相互作用>

[併用注意]

ラテックスグローブ、ニトリルグローブ

- ・本品は薬品、溶剤等によっては膨潤したり、硬化・浸透する場合がありますため注意して使用すること。

<不具合・有害事象>

ステリストリップ

[その他の有害事象]

- ・皮膚の異常（腫れ、水疱、発赤、発疹、ただれ、痒み、毛包炎）
- ・皮膚の色素の沈着、脱失、瘢痕の形成

<その他の注意>

ステリドレープ

- ・高温を発する機器類に接しないよう注意すること。
- ・本品に自着性粘着包帯が含まれている場合、適用部位に必要以上の圧迫を加えないこと。
- ・本品に切開用フィルムドレープが同梱されている場合、切開用フィルムドレープを縫合糸、ステイブルなどの創傷閉鎖材料の代品として使用しないこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管する。

2. 使用期限

- 使用期限（自己認証）を袋に記載している。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

取扱説明書を必ずご参照ください。