

2in1ポジショニング ブルーパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 1 回限り使用のディスポーザブル品であり、再使用禁止。
- ・ 改造を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】


1.概要

本品は、ブルーパッド本体、補助パッド、リフトシート、抑制帯から構成される。

**2.形状(代表例)


ブルーパッド本体**

補助パッド**

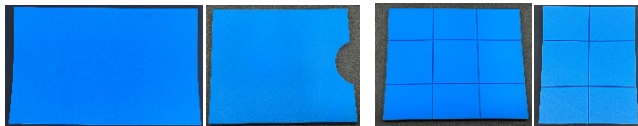

リフトシート

抑制帯

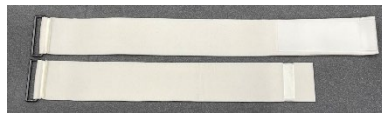

外観写真

3.原材料

部品名称	原材料
ブルーパッド本体	ポリウレタンフォーム
補助パッド	ポリウレタンフォーム
リフトシート	不織布
抑制帯	PET/ポリウレタンフォーム

4.原理

本品を手術台に設置して使用することで、手術中の患者の体位を固定・保持する。

5.寸法

名称	寸法
ブルーパッド本体	*W:40~60cm、L:60~100cm、 D:2~4cm
補助パッド	*W:40~60cm、L:60~100cm、 D:2~4cm
リフトシート	W:32cm、L:190cm
抑制帯	①W:10cm、L:80cm ②W:10cm、L:60cm

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に附属するアクセサリである。

【使用方法等】


1.使用方法

- 1) ブルーパッド本体の両面テープ装着面が、手術台の表面にくるように設置する。
- 2) ブルーパッド本体の凹みと、手術台の凹みの位置を合わせる。

- 3) ブルーパッド本体の両面テープの保護シールを剥がし、手術台に貼り付ける。
- 4) リフトシートをブルーパッド上に敷き、患者の肩甲骨と仙骨にかからない位置に配置する。
- 5) 患者の臀部が、ブルーパッドの凹みに合う位置に、患者を寝かせる。
- 6) 抑制帯を手術台サイドレールの下から通して手術台に取り付ける。
- 7) 2本の抑制帯を患者の胸部の上で重ねて、テープで固定する。

2.使用方法(補助パッド)

- 1) 補助パッドは、必要に応じて患者の身長(肩や頭の位置)に合わせて、任意で使用する。
- 2) 補助パッドを切断する際は、下図のように持って、矢印方向に軽く力を入れて千切る。

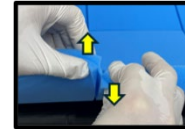

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 使用前に破損、汚損がないことを確認し、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・ 使用後は感染防止等に留意し、安全な方法で処分すること。
- ・ ブルーパッド本体、補助パッドを丸めたり、折り曲げたりしないこと。
- ・ 患者とブルーパッド本体の間に、リフトシート以外のものを敷かないこと。
- ・ 術中、定期的に患者の体位を水平位に戻し、皮膚の血行状態を確認すること。
- ・ 未開封時および包装から取り出す際、開封後は強い力を加えないよう、丁寧に扱うこと。
- ・ ブルーパッド本体を手術台から剥がす際は、頭部から臀部方向(または臀部から頭部方向)に引っ張ること。[手術台への接着テープの残留を防ぐため。]

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

**折れ曲がり、水濡れに注意し、紫外線、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

5 セット/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ガデリウス・メディカル株式会社

住 所: 神奈川県相模原市中央区富士見2-7-1

電話番号: 042-769-3221