

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ（JMDN 35917102）

I. C. サクションチップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 本品は単回使用品であるため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 本品は滅菌品であるため、直接梱包に表示されている滅菌有効期限内に使用し、滅菌有効期限が過ぎたものは使用しないこと。
3. 包装が開封、破壊又は汚損しているものは使用しないこと。
4. 本書に指定された製品に以外と併用はしないこと。
5. MRI 等、強い磁場を発生する機器を併用しないこと〔発熱の危険がある〕

【形状・構造及び原理等】


1. 形状及び寸法

■チップ：ハンドル併用型：カーブ型

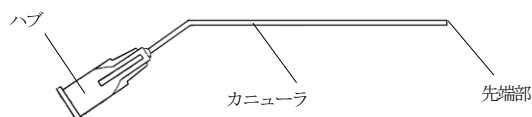


- ・カニユーラ長さ
：70/77/80/100/150mm
- ・カニユーラ外径
：0.4/0.7/1.0/1.2/1.4/1.7/2.0/2.5/3.0/4.0 mm

■チップ：ハンドル併用型：ストレート型

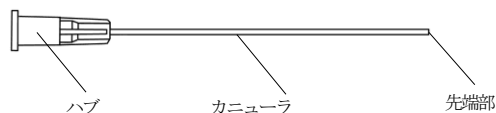


- ・カニユーラ長さ
：60/70/80/100mm（60mm のみハブ長さを含む）
- ・カニユーラ外径
：1.0/1.4/1.7/2.0mm

■チップ：単体使用型

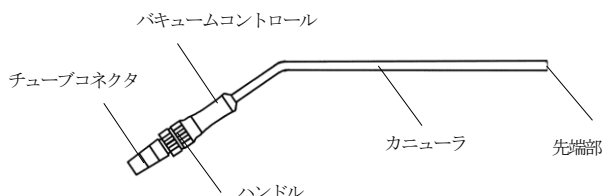

- ・カニユーラ長さ
：90/110/112/120/122/130/150/190/300/400/500/550mm
- ・カニユーラ外径
：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm
- ・カニユーラ角度
：20° / 35° / 27° R150/41° R30/60° R21/63° R20

■付属品：ハンドル

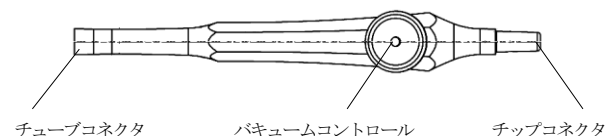

※ハンドルには複数の形状が存在する。上記は代表形状である。

2. 原材料：

■チップ：ハンドル併用型

- ：カニユーラ・先端部 ステンレススチール
- ：ハブ ポリプロピレン

■チップ：単体使用型

- ：カニユーラ・先端部 ステンレススチール
- ：ハンドル ポリメチルメタクリレート

■付属品：ハンドル

- ：ABS

**【使用目的又は効果】

外科、口腔外科又は頭蓋顔面外科、耳鼻咽喉科等の手術又は処置等において、血液、体液、分泌液又は骨片等を吸引・排出すること。

**【使用方法等】

1. 使用前準備：

- 1) 使用状況を勘案し、本品の型式及びサイズを選択する。
- 2) 滅菌包装に破損等の異常が無いことを確認してから、本品を滅菌包装から取り出す。
- 3) ハンドル併用型のチップを使用する場合は、ハンドルのチューブコネクタに吸引用チューブを接続し、ハンドルのチップコネクタにチップを接続する。
- 4) 単体使用型のチップを使用する場合は、チューブコネクタに直接吸引チューブを接続する。

2. 使用中の操作：

- 1) 吸引器を作動させ、吸引圧力を発生させる。
- 2) 先端部を処置部に近づけながら、血液、体液、分泌液又は骨片等の吸引・排出を行う。
- 3) 術者がハンドルのバキュームコントロールを指で押さえることにより、吸引圧力を変化させることができる。

3. 使用後の処置：

- 1) 処置が終わったら、吸引器及び吸引用チューブからチップ、ハンドルを取り外す。
- 2) チップ、ハンドルは再使用できないので、使用後は廃棄する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ・使用前に本品に破損等が無いことを確認すること。異常が認められた場合は使用をしないこと。
- ・カニユーラが破損した場合は使用を中止すること。
- ・電気メスを併用する場合は、カニユーラ及び先端部との接触に注意すること。
- ・処置部に先端部を強く押しつけないこと。

2. 重要な基本的注意

- ・吸引の手技を熟知した者以外使用しないこと。
- ・本品及び患者に異常のないことを絶えず観察し、異常が発見された場

合は、吸引を中止するなど、適切な措置を講ずること。

****【保管方法及び有効期間等】**

1. 貯蔵・保管方法

本品は高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間・使用の期限（耐用期間）

滅菌日から5年間（未開封時）

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

<外国特例認証取得者>

Mediplast AB（スウェーデン）

<選任製造販売業者>

ガデリウス・メディカル株式会社

電話：042-769-3221

<製造業者>

Mediplast AB（スウェーデン）

<販売業者>

株式会社 名優

千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

電話：047-480-6161