

機械器具 (25) 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ JMDN 37090010

コネクターキャップ O-V T

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本製品は、内視鏡のビデオコネクター部に取り付け、内視鏡洗浄消毒器の消毒剤等の液体から内視鏡のビデオコネクター部（電極）を保護することを目的とした、内視鏡のビデオコネクター部（電極）を覆うコネクターキャップである。

2. 原材料

シリコン

3. 構造

概略図

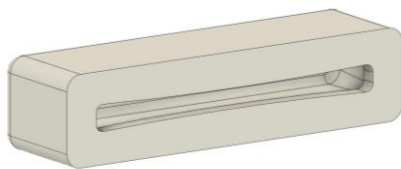

4. 原理

内視鏡のビデオコネクター部に取り付け、ビデオコネクター部の電極と消毒剤等の液体との接触を防止する。

【使用目的又は効果】

本製品は、内視鏡のビデオコネクター部に取り付け、内視鏡洗浄消毒器の消毒剤等の液体から内視鏡のビデオコネクター部（電極）を保護することを目的とする。

【使用方法等】

- ・ 本製品の外観の点検を行い、ひび割れ、変色、変形等の異常がないことを確認する。
- ・ 内視鏡のビデオコネクター部に本製品を装着する。
- ・ 本製品を装着した内視鏡を用手洗浄後、内視鏡洗浄消毒器にて洗浄消毒する。
- ・ 内視鏡より本製品を取り外す。

【使用上の注意】

- ・ 本製品の形状に対応した内視鏡のビデオコネクター部に使用すること[内視鏡のビデオコネクター部を損傷するおそれがある。]
- ・ 使用前に外観の点検を行い、ひび割れ、変色、変形等がある場合は使用しないこと[内視鏡のビデオコネクター部を損傷するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

水気を拭き取り乾燥させ保管すること。

【保守・点検に係る事項】

ひび割れ、変色、変形等がある場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：カイゲンファーマ株式会社

大阪市中央区道修町二丁目 5 番 1 4 号

TEL:06-6202-8975

FAX:06-6202-0872