

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用軟性把持鉗子 35524000

単回使用フレキシブル把持鉗子


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用・滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

※代表的なタイプを下記に示す。

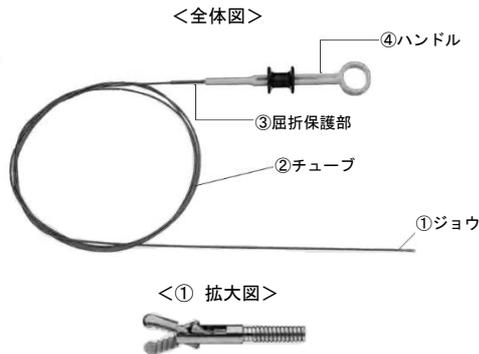

各部の名称		原材料
①	ジョウ	ステンレス鋼※
②	インナーワイヤー	ステンレス鋼
	アウターシース	ステンレス鋼※
③	屈折保護部	ステンレス鋼
④	ハンドル	ステンレス鋼

※：体液又は血液に間接的又は直接接触することがある部分

【使用目的又は効果】

本品は専用の内視鏡とともに使用する器具で、組織又は異物を把持するために用いる。

【使用方法等】

- 内視鏡のワーキングチャンネルから本品を閉じた状態で挿入する。
- ハンドル操作で先端を開き組織または異物を採取する。
- 採取した組織または異物を保持したまま本品をワーキングチャンネルから引き抜く。
- 使用後は速やかに本品を廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 組織・粘膜を傷つける恐れがあるため、挿入部に傷、めくれ等がなく、滑らかであることを必ず確認すること。
- 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 本品を挿入・除去の際は、十分に注意しながらゆっくりと行うこと。
- 共に使用する軟性内視鏡の先端部を曲げている状態では、ワーキングチャンネルからの本品の出し入れを行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管の際は、清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。
(特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 473