

機械器具 ５１ 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000
(再使用可能な内視鏡用非能動処置具 38818000)

TW I N F l o w サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン ハンドル

再使用禁止（サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ 部分のみ）


*【禁忌・禁止】

1. サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ 部分は再使用・再滅菌禁止。

*【形状・構造及び原理等】

※代表的なタイプを下記に示す。

<外觀>

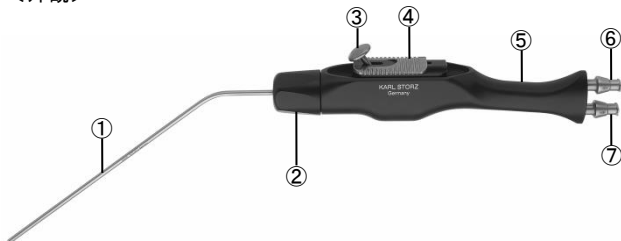

<各部の名称及び機能>

番号	名称	機能及び動作
①	サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ※	サクシ ョ ン / イリゲーシ ョ ン を行う
②	固定キャップ	サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ を固定する
③	イリゲーシ ョ ン 流量調節ノブ	イリゲーシ ョ ン 流量の調整を行う
④	サクシ ョ ン / イリゲーシ ョ ン 切替スライド	イリゲーシ ョ ン / サクシ ョ ンの切替を行う
⑤	サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン ハンドル	本品を把持する
⑥	イリゲーシ ョ ン ポート	イリゲーシ ョ ン チューブ を接続する
⑦	サクシ ョ ン ポート	サクシ ョ ン チューブ を接続する

※：体液又は組織に直接あるいは間接的に接触する部分

<原材料>

ステンレス鋼

<作動・動作原理>

本品は、外部の灌流装置または吸引装置を利用して、イリゲーシ ョ ン またはサクシ ョ ン を行う機器であり、サクシ ョ ン、イリゲーシ ョ ンの切替を行うことができる。

【使用目的又は効果】

本品は、サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ とサクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン ハンドル を組み合わせることにより、内視鏡手術時に、灌流液等の送水や組織や灌流液等の吸引を行う機器である。

*【使用方法等】

<使用前>

1. サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン ハンドル ⑤ に適切なサクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ ① を接続する。
2. 固定キャップ ② を回し、ハンドルとチューブをしっかりと固定させる。
3. イリゲーシ ョ ン ポート ⑥ にイリゲーシ ョ ン チューブ を接続する。
4. サクシ ョ ン ポート ⑦ にサクシ ョ ン チューブ を接続する。

<使用中>

5. サクシ ョ ン / イリゲーシ ョ ン 切替スライド ④ を操作し、サクシ ョ ン またはイリゲーシ ョ ン を行う。

<使用后>

6. 使用後は使用前と逆の手順で本品を取り外し、サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン チューブ は速やかに廃棄する。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 組織・粘膜を傷つける恐れがあるため、挿入部に傷、めくれ等がなく、滑らかであることを必ず確認すること。
2. 材質の劣化を促進する恐れがあるため、本品を超音波洗浄器にかけないこと。
3. 本品は未滅菌品のため、使用前に所定の方法で滅菌を行うこと。
4. 滅菌は常に同一の方法で行うこと。異なる滅菌方法を実施すると、構造物に負担をかけ本品の劣化・損傷を招き、故障に繋がる恐れがある。

5. 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
6. 使用後は、付着している血液、体液、組織液及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
7. 塩素系及びヨウ素の消毒剤は腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。
8. イリゲーシ ョ ン を行う場合には、灌流圧を 100mmHg 以下に設定すること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の際は、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に係わらず必ず乾燥すること。
2. 滅菌済のものを保管の際は、再感染を防止するために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

*【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）
3. 使用後は、速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。
4. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が破損するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
5. 付着物は修復不能な破損の原因になるので、器具は使用後、速やかに洗浄の準備をすること。
6. 洗浄方法

サクシ ョ ン イリゲーシ ョ ン ハンドル の 洗浄方法

(1) 自動洗浄器

- ① 適切なラック（製品番号：39501 シリーズ）を使用し、他の機器と重なり合わないように入れること。（他の機器と重なり合うことにより破損の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する。）
- ② 温水の温度が 93℃を超えないこと。
- ③ 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

(2) マニュアル洗浄

- ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行なう。
- ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
- ③ 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器（27645 等）を準備すること。
- ④ 洗浄手順
 1. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。
水温は 43℃前後（暖かいと感じる温度）が適温である。
薬剤による器具の破損の可能性があるので、溶液には 60 分以上浸漬したままにしないこと。
 2. スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
 3. 管内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
 4. 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
 5. ホコリが出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。

7. 洗浄後の器具の点検とお手入れ

- (1) 外観の目視（特に体内に入る部分は入念に）確認、可動部の機能確認を行うこと。
- (2) プラスチック又はシリコン部品の変色・変質・柔軟性（硬化の有無）・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。

8. 洗浄剤

- (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。（材質に影響を与え、機械を破損させる可能性が高い。）

- (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。

9. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。

注: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。

(1) エチレンオキシドガス滅菌方法

本品を滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。

＜滅菌条件①＞

- ・ガス混合物 : エチレンオキシド 100%
- ・ガス濃度 : 725±30mg/L
- ・温度 : 55℃
- ・湿度 : ≥70%RH
- ・圧力 : 0.09MPa
- ・時間 : 1～2 時間 (滅菌機材による)

＜滅菌条件②＞

- ・ガス濃度 : 600～700mg/L
- ・温度 : 40～60℃
- ・湿度 : 50～60%RH
- ・圧力 : 0.1MPa
- ・時間 : 3～6 時間

＜ガス除去方法＞

51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。

(推奨 55℃で 12 時間)

(2) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

- ・温度 : 134～137℃
- ・時間 : 4～18 分間

※真空式高圧蒸気滅菌 (pre-high vacuum) 方式のオートクレーブを推奨する。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

(3) プラズマ滅菌 (ジョンソン・エンド・ジョンソン社/販売名「ステラッド 100S、NX 又は 100NX」)

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

- ・温度 : 約 45～55℃ (機種による)
- ・湿度 : 約 10%RH
- ・時間 : 28～105 分 (機種による)

(4) 薬液消毒方法

容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

＜消毒条件＞

- ・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL : 03-6380-8622

製造業者 : KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名 : Germany

添付文書番号 : KSTJ - 1078