

類別：器具器械（29）手術用電気機器及び関連装置  
一般的名称：電気手術器用ケーブル及びスイッチ  
一般医療機器（JMDN コード：70657000）


## リードバイポーラアダプター

### 【禁忌・禁止】

本品の加工、改造等は絶対に行なわないこと。〔振動・切削打刻（刻印等）等により製品を著しく劣化、消耗させ、故障・破損の原因となるため。〕

### 【形状・構造及び原理等】

形状・構造（代表例）

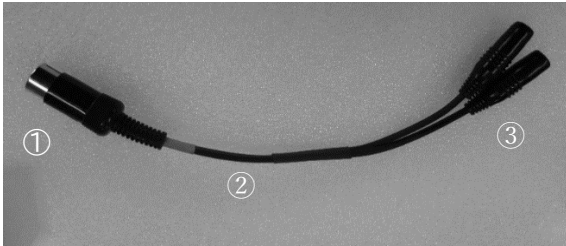

### 寸法

電気手術器接続プラグ 全長：60mm

ケーブル 全長：150mm

バイポーラケーブル接続プラグ 全長：40mm

### 原理

手術用電気機器とバイポーラケーブルとの接続に用い、信号等を伝達や電源の供給を行う。

### 【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いる。

### 【使用方法等】

#### 使用前の準備

消毒を行う。アルコールを浸したガーゼ等で拭き、よく乾燥させた後に使用すること。

#### 使用方法

電気手術器の主電源が入っていないことを確認すること。電気手術器接続プラグを電気手術器に接続する。バイポーラケーブル接続プラグをバイポーラケーブルに接続する。通電を確認してから使用する。

### 【使用上の注意】

本品の使用前及び使用後は、破損・変形・亀裂・傷、摩耗がないかを点検し、破損等が確認された場合は使用しないこと。

破損等の原因になり得るので、使用時には必要以上の力を加えないこと。

本品、その他の併用機器及び患者に異常がないことを常に監視し、異常が認められた際には、患者に安全な状態で適切な処置を講ずること。

### 【保管及び有効期間等】

直射日光および水濡れを避け、清潔な場所で保管すること。本品の使用前及び使用後は、破損・変形・亀裂・傷、摩耗がないかを点検し、破損等が確認された場合は使用せず、廃棄すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### <消毒方法>

アルコールを浸したガーゼ等で拭き、よく乾燥させた後に使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

株式会社カキヌマメディカル

電話 03-3813-8485