

フロー プラス ジーンズ

【警告】

以下の方には、特に注意してご使用ください。

- 1) 深部静脈血栓症、下肢表在静脈血栓症など、肺血栓症を発症するおそれがある患者
- 2) 下肢閉塞性動脈硬化症などの血行障害、うっ血性心不全、炎症/化膿/疼痛を伴う皮膚疾患、創傷があるなど、圧迫により症状が悪化するおそれがある患者
- 3) 急性循環不全、末梢循環不全など、血流低下により壊死が起こるおそれがある患者
- 4) 糖尿病患者など、知覚障害や神経障害により痛みや血行障害などを認識できない患者

【禁忌・禁止】

- 下肢に極度の変形がある患者 [適切な圧迫圧が得られないため]
- 繊維や金属など、使用材料に対して過敏症がある患者 [皮膚アレルギーを起こすため]
- MRI などの高磁場発生機器や電気メス、AED など電力発生機器の近くでは使用しないでください [金属を使用しているため]
- 就寝時は着用しないでください [適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため(医師の指示がある場合を除く)]

【形状・構造及び原理等】

フロー プラス ジーンズは、足首、ふくらはぎ、太もも等を漸減的に圧迫することで、静脈血やリンパの流れを促進する医療用ジーンズです。

下半身に適切にフィットするよう、長さや太さ等のサイズや形状を調整するオーダーメイド品です。

高い伸長性、伸長回復性を有する伸縮性繊維と縫製加工技術により、末梢から中枢に向かう各部位に漸減的な圧迫を加えます。

(代表図)



使用材料)

ジーンズ	コットン、ポリウレタン、ポリエステル ポリアミド樹脂、ナイロン
ファスナー ボタン	銅亜鉛合金、アルミ合金、ポリエステル

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、静脈、リンパ灌流を促進する。

【使用方法等】

サイズ計測)

- 1) 足首、ふくらはぎ、ウェスト等のサイズ計測を行います。
- 2) 浮腫の発生状況やサイズ計測結果等を元に、サイズや形状を決定します。

装着)

- 1) ボタンをはずし、ファスナーを開けます。
- 2) 足を通し、フロープラスジーンズをはきます。
- 3) しわ、ねじれ、たるみがないよう全体をなじませ、足首、ふくらはぎ、膝の位置を合わせます。

【使用上の注意】

- ・ 使用に際して、医師の指示に従ってください。
- ・ 破れなど、破損が無いことを確認のうえ、使用してください。
- ・ 医師や医療従事者など、本品の取扱いに精通した方が、装着者される方に、使用目的や使用方法について説明してください。
- ・ 装着中にしわ、ねじれ、たるみが発生した場合や誤った位置に装着されている場合は、正しく装着し直してください。適正な圧迫圧が得られず、血行障害や神経障害などの原因となるおそれがあります。
- ・ 医師が必要と認める場合を除き、本品をハサミ等で切って使用したり、折り返して使用しないでください。適切な圧迫圧が得られない可能性があります。
- ・ 弾性包帯、間欠的空気圧迫装置など、他の圧迫療法と併用する場合、過度の圧迫圧が加わる可能性があります。圧迫療法との併用については、必ず医師に確認してください。
- ・ 装着中、ズレ、圧迫、過敏症/アレルギーなどにより、血行障害(チアノーゼやしびれなど)、神経障害(腓骨神経麻痺など)、皮膚障害(かぶれ、発疹など)などの異常が発生した場合、使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- ・ 術後や知覚/神経障害があるなど、異常が検知できない可能性がある患者が使用する場合は、状態をよく観察して使用してください。
- ・ ハサミなど、鋭利なものと接触した場合、破損する可能性があるため、注意してください。
- ・ サイズ/体形が変わった場合は、使用中止、サイズ再計測などの適切な処置を行ってください。
- ・ 本品は個人用製品です。他人への使いまわしはしないでください。
- ・ 衣料品として地域の条例に従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ・ 濡れたまま放置しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 液温は 40℃を限度とし、洗濯機での弱い処理が可能です。
- ・ 濃色は白色/淡色と分けて洗濯してください。
- ・ 塩素系/酸素系の漂白剤は使用しないでください。
- ・ タンブル乾燥しないでください。
- ・ アイロンはあて布をご使用ください。
- ・ 摩擦などで移染しやすいので、白物の着用にはご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 ネクシス

〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島 3-17-27-1

電話：092-436-5670

製造業者：嘉興茉織華華為制衣 有限公司（中国）

販売業者連絡先：