

\* \* 2019年11月改訂（第3版）  
 \* 2015年11月改訂（第2版）

製造販売届出番号：28B3X10006000030

機械器具 54 医療用捲綿子

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

## FLOQスワブ5U005Sデュアル

### 再使用禁止

【禁忌・禁止】  
 ●再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】


#### 1. 形状・構造

本品は、ナイロン製の軸の先端部にポリアミド製の繊維を取り付けた綿棒です。軸側のキャップに2本の綿棒が取り付けられ、1回の操作で2本の綿棒に検体採取が可能です。検体採取後の綿棒を格納・輸送できるチューブに入っています。

|    |             |   |             |
|----|-------------|---|-------------|
| 材質 | 綿球          | ： | ポリアミド（淡黄色）  |
|    | 軸           | ： | ナイロン（白色半透明） |
|    | チューブ        | ： | ポリプロピレン     |
|    | キャップ        | ： | ポリエチレン      |
| 寸法 | 綿棒全長        | ： | 150 mm      |
|    | 綿球長         | ： | 17.5 mm     |
|    | 綿球直径        | ： | 5.0 mm      |
|    | チューブ包装状態の全長 | ： | 170 mm      |

#### 外観図

包装状態（未開封）                      キャップは黄色

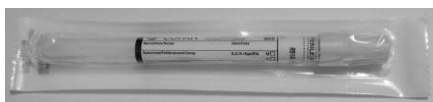

開封後の綿棒と外装チューブ



#### 2. 滅菌・包装袋・チューブ等

本品は外側の個包装袋とともに滅菌済みです。

### \*【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取する器具です。  
 主に咽頭からの検体採取に適しています。

### 【使用方法等】

個包装袋を開封して、チューブごと取り出します。綿球に触れないように、キャップを持って綿棒を取り出し、そのまま検体の採取に使用します。検体を採取した後、綿棒をチューブに挿し戻し、しっかりとキャップをしてください。必要に応じて、採取検体に関する情報をチューブのラベルに記載します。

### \*【使用上の注意】

- 1) 本品の使用は1回限りです。再使用はできません。
- 2) 本品は個包装袋とともに滅菌済みですので、外側の袋に破れや汚染の疑いがある場合は使用しないでください。個包装袋に異常がある場合、チューブが未開封であっても、滅菌状態が損なわれている可能性があります。
- 3) 開封後は、速やかに検体採取を行ってください。

- 4) 検体採取時に綿棒をキャップから外して使用することは避けてください。
- 5) 本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れ等があった場合は使用しないでください。
- 6) 検体採取時、軸部分に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方はしないでください。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。
- 7) 臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具（眼鏡、手袋、マスク等）を着用のうえ、充分に注意して操作を行ってください。
- 8) 本品の使用後の廃棄にあたっては、滅菌処理を行い、関連する法律や規定に従って処分してください。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

2～30℃で、濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。

#### 2. 使用期限

外箱、個包装袋及びチューブのラベルに、製造番号とともに記載してあります。

### \* \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社シン・コーポレイション

TEL：078-586-5670

外国製造業者（国名）

Copan Italia S.p.A.

コパンイタリア社（イタリア）