

2019 年 6 月 4 日 作成（第 1 版）

器 32 医療用吸引器

一般医療器 再使用可能な汎用吸引チップ（JMDN コード：38749000）

カニューレ

【禁忌・禁止】

- ・未滅菌のままでの使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は先端を塞ぎ側面に穴をあけたステンレス製の管と、吸引用具に接続する金基で構成されている。

【使用目的、効能又は効果】

手術又は治療時に吸引器具に接続し、吸引する吸引管である。

【操作方法又は使用方法等】

- ・本品は未滅菌であるので、使用前に滅菌を必要とする。
滅菌条件等は、本製品の受入先の基準にて実施する。
- ・本品の金基を吸引用具に接続し使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本品の使用目的、使用方法及び手技を理解した医師のみが使用すること。
- (2)本品の使用前、使用中、使用後に破損、変形、傷、緩みや動作の異常等がないことを確認すること。これらの異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。
- (3)緊急時に備え、代用品を準備すること。
- (4)破損、変形、傷、緩みの原因となるような過度の力を加えないこと。
- (5)すべての接続部がしっかり固定されていることを確認すること。
- (6)一つの吸引回路に複数の吸引管を接続して使用しないこと。（吸引力の低下や吸引停止を引き起こす可能性がある）
- (7)吸引を行う際は、徐々に吸引圧を上げること。
- (8)吸引能力が低下した場合は速やかに使用を中止し、詰まりの原因を取り除くこと。

- (9)本品が術野内等で破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。

- (10)生命の維持に重要な器官や神経及び血管の近くで本品を使用する場合は、必要以上の負荷を加えて患者に損傷を与えないよう十分注意すること。

- (11)変色あるいは腐食する恐れがある為、苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド又はブリーチを含む洗浄液やその他のアルカリ性洗浄剤で、本品を洗浄しないこと。

- (12)高圧蒸気滅菌にて 134℃／5 分を推奨するが、変性や劣化が生じる恐れがある為、本品の滅菌には 134℃を超えないこと。

【貯蔵・保管方法】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な環境で室温保存する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〈製造販売元及び製造業者〉

名 称：株式会社メディカルプランニング

住 所：埼玉県飯能市阿須 445-17

電話番号：042-978-5071