

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

アスピレーションライン

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 本品に加工を施さないでください。


【形状・構造及び原理等】

* 1. 形状図

(1) シングルルーメンタイプ

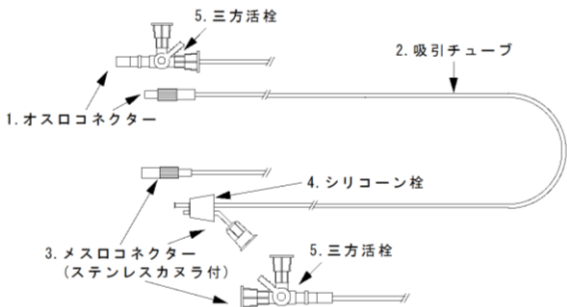

(2) ダブルルーメンタイプ

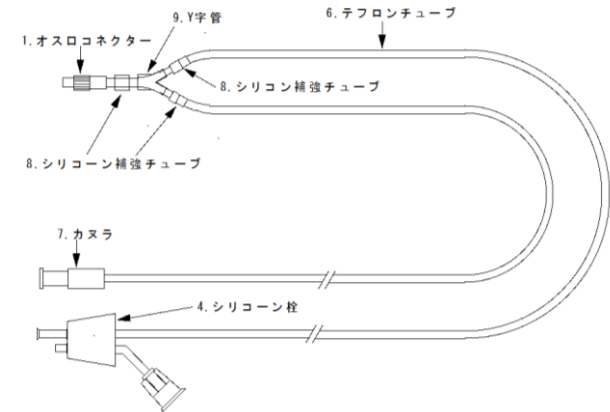

2. 原材料

吸引チューブ	ポリウレタン ポリ塩化ビニル
三方コック	ポリカーボネート
三方活栓(コック)	ポリエチレン
*テフロンチューブ	*テフロン

* 3. 滅菌方法

放射線滅菌又はエチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

本品は、吸引器具と回収容器の接続に用いる吸引用のチューブである。

【使用方法等】

1. 使用前点検
 - 1) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検をする。異常が認められたときには使用しない。
2. 使用方法
 - 1) オスロコネクター又は三方活栓を吸引器具にしっかりと嵌めた後、確実にロックをしてください。ロックはねじ式になっております。
 - 2) メスロコネクター又は三方活栓に回収容器を接続してください。回収容器が試験管等の場合には、試験管口にシリコン栓をしっかりと嵌め込んでください。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 使用前には必ず添付文書をお読みください。
 - 2) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
 - 3) 使用直前に開封してください。
 - 4) 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められるものに関しては使用しないでください。
 - 5) 本品は使用における手技に精通した術者が行ってください。
 - 6) 本品に改造を施さないでください。
2. 使用上の重要な注意
 - 1) 使用中に接続チューブ内に詰まりが認められた場合には、直ちに吸引操作を中止し、速やかに本品を交換してください。
 - 2) ポリ塩化ビニルの製品は、可塑剤が溶出する可能性があります。
3. その他の注意
 - 1) 本品は滅菌済みです。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。
2. 有効期間・使用の期限
製品ラベルに使用期限を記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装 10 本入／箱

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL:0545-65-7122 FAX:0545-65-7128

製造業者 株式会社北里

**【お問い合わせ先】

株式会社北里
TEL:0120-457-454(フリーダイヤル)
FAX:0120-111-471