

機械器具 54

一般医療機器 医科用綿棒 10172000

スワブキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品は、プラスチック製又はアルミニウムの軸先端部にレーヨン製の綿球がついた検体採取用のスワブであり、検査のための試料を採取し、培地入容器に入れて保存及び輸送を行うことを目的とした器具である。

本製品は包装袋で包装し、滅菌したのち使用する。

綿球部の材質：レーヨン製

キャリブレア培地（組成：培地 1000mlあたり）：

塩化ナトリウム …5.0g リン酸一カリウム …0.2g
塩化カルシウム…0.1g リン酸二ナトリウム…1.1g
寒天…4.2g チオグリコール酸ナトリウム…1.5g

アミーズ培地（組成：培地 1000mlあたり）：

塩化ナトリウム …3.0g リン酸一カリウム …0.2g
塩化カルシウム…0.1g リン酸二ナトリウム…1.15g
塩化カリウム …0.2g 塩化マグネシウム…0.2g
寒天…6.0g チオグリコール酸ナトリウム…1.0g
活性炭…10.0g

【使用目的、効能又は効果】

検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

【品目仕様等】

無菌性保証水準（SAL）：10⁻⁶

【操作方法又は使用方法等】

1. 袋上部の開封口を開け、キャップ付綿棒を取り出し培地入り容器のキャップをはずします。
2. キャップ付綿棒で検体を採取します。
3. 検体を採取した綿棒を培地入容器に挿入し、キャップを押し込み閉栓します。

商品名	培地	軸
スワブキット 1 号	キャリブレア培地	プラスチック軸
スワブキット 2 号	アミーズ培地	アルミニウム軸
スワブキット 3 号	アミーズ培地	プラスチック軸

【使用上の注意】

- 採取時に無理な力をかけないで下さい。採取部の粘膜等を傷つけ、綿棒が折れることがあります。
 - 検体を採取する前に軸部分を折り曲げるなど、湾曲させて使用しないこと。
 - 本製品は滅菌済みであり、包装材が破損しているなど、汚染の疑いがあるものは使用しない。
 - 開封後は速やかに使用する。
 - 便検体を採取するときは排便された便から採取すること。
 - 検体は速やかに検査して下さい。
 - 検体採取、保存輸送以外に使用しないで下さい。
 - 保存する場合は冷所保存して下さい。
 - 本製品は再使用しない。
 - 使用後は速やかに滅菌処理して廃棄して下さい。
- ※ 使用期限の過ぎたものは使用しない。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管する。
2. 1 本個包装袋の上部開封口部に記載されている。使用期限が過ぎたものは使用しないこと。

【包装】

1 箱 1000 本入り

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者:

株式会社 ホーエイ

〒567-0852

大阪府茨木市小柳町 8-11

TEL : (072)-637-1033