

機械器具 75 脱疾治療用具

一般医療機器 脱疾治療用ストラップ JMDN コード：30883000

ミムロそけいベルト

* 印：改訂箇所を示す。

【 警 告 】

- ・ 本品の使用には、鼠径ヘルニアに対する正しい知識が必要です。必ず医師の指導の下でご使用下さい。
- ・ 本品は鼠径ヘルニアによる脱疾の抑制、保持を目的とした製品です。症状を改善、治療する効果はありません。
- ・ 本品の使用によりアレルギー性症状等の異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、医師にご相談下さい。

【 禁 忌 ・ 禁 止 】

- ・ 装着部の皮膚に傷や疾患等のある方は使用しないで下さい。症状が悪化する恐れがあります。
- ・ 本品により脱疾が抑制されない場合は、速やかに使用を中止して下さい。症状の悪化に繋がる恐れがあります。
- ・ 本品は一患者使用の製品の為、他の人との共用はしないで下さい。衛生上の問題が発生する恐れがあります。
- ・ ウエスト周囲長が適用範囲外の方は使用しないで下さい。適切な効果が得られないほか、製品が破損する恐れがあります。

【 形 状 ・ 構 造 及 び 原 理 等 】

< 形 状 ・ 構 造 >



本体（ウエストベルト、ズレ防止ベルト、面板）
パッド（カバー×2枚、スポンジ×6枚）

ウエスト適用範囲：65 ～ 120 cm

< 原 材 料 >

ベルト生地：綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
バックル：ポリアセタール
面板：ナイロン、ポリエステル、ポリ塩化ビニル
カバー生地：綿
スポンジ：ポリエチレン

< 原 理 >

鼠径部の筋膜の間から皮膚の下の突出したヘルニアを元の位置に戻し、本品のスポンジパッドによって患部を圧迫することで、一時的に鼠径ヘルニアの症状を緩和させます。

【 使用目的又は効果 】

骨盤及び腹部に巻くことで、鼠径ヘルニアによる腹部の脱疾を正常な位置に保持します。

【 使用 方 法 等 】

< 使用 方 法 >

- 1.) 製品を袋から取り出し、破損や欠損等が無いことを確認して下さい。
- 2.) パッドを外し、ウエストベルト、ズレ防止ベルトの調節部を緩めます。
- 3.) 装着時のイメージ図を参考に、下着を履くように身に着け、ウエストベルトを軽く締めます。
- 4.) 仰向けに寝た状態でヘルニアを静かに腹部の方へ揉み入れます。
- 5.) パッド内のスポンジの枚数を適切に圧迫出来る枚数に調節します。
- 6.) パッドの面ファスナーを外側に向けて、面板内側の適切な位置に取り付けます。
- 7.) ウエストベルトとズレ防止ベルトの締め具合を調節します。この時必要以上に締め過ぎないように注意して下さい。
- 8.) 患部が適切な強さで圧迫され、ヘルニア部が保持されていることを確認して下さい。



（装着時のイメージ図）

【 使用上の注意 】

< 重要な基本的注意 >

- ・ 使用目的以外の用途には使用しないで下さい。
- ・ 本品の改造や修理はしないで下さい。

【 保管方法及び有効期間等 】

< 保管 方 法 >

- ・ 直射日光、高温多湿、汚染を避けて保管して下さい。

< 耐用 期 間 >

- ・ 本書に従い適切に使用した場合、使用開始から3年です。

< 廃 棄 時 の 注 意 >

- ・ お住いの地域の規制に従って廃棄して下さい。

【 保守・点検に係る事項 】

< 洗 浄 方 法 >

- ・ 40℃以下の温水での手洗いを推奨しております。
- ・ 洗濯機を使用する場合は、必ずネットに入れて下さい。
- ・ 汚れが落ちない場合は、衣料用の中性洗剤を使用して下さい。
- ・ 洗浄後は風通しの良いところで陰干しして下さい。
- ・ 中性洗剤以外の洗剤や薬品（合成洗剤、漂白剤、アルコール、溶剤等）の使用、ドライクリーニング、アイロン、乾燥機の使用、直射日光による天日干しはしないで下さい。劣化、破損の原因となります。

【 包 装 】

セット内容：本体、パッド（カバー× 2 枚、スポンジ× 6 枚）

※ カバー、スポンジは単体での販売もしております。

【 製 造 販 売 業 者 及 び 製 造 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 等 】

〔 製 造 販 売 業 者 〕

株式会社豊栄

所在地：千葉県柏市風早 1-8-9

TEL：04-7192-3321(代) FAX：04-7192-3310

[http：//www.k-houei.co.jp](http://www.k-houei.co.jp)



〔 総 販 売 元 〕

株式会社ミムロ

所在地：千葉県千葉市中央区松波 1-13-16

TEL：043-307-5020(代) FAX：043-307-5028

[https：//www.stoma-belt.jp](https://www.stoma-belt.jp)



商品のお問い合わせは、総販売元をお願いいたします。