

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング JMDNコード:31724000
シー・スリー・フィット アーチサポートハイソックス2

【警告】

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用にならないでください。
(1) 重度の血行障害、うっ血性心不全および有痛性青股腫、感染性静脈炎、装着部位に極度の変形を有する方。(2) 現在、装着部位に傷や炎症がある方。
- 次の方は着用前に医師にご相談ください。
(1) 深部静脈血栓症の方。(2) 血圧の高い方、心臓などの血行に障害のある方。(3) 装着部位に神経障害をお持ちの方。(4) 糖尿病の方。(5) 繊維に対して過敏症のある方、かぶれやすい体質の方。(6) 妊娠中または妊娠していると思われる方。(7) 高齢の方。
- 次のことを必ず守って正しくお使いください。
(1) ひざ下以外の部位には使用しないでください。(2) 適切な圧力を得るために、正しいサイズをお選びください。(3) 就寝時には着用しないでください。立位姿勢を元に設計されています。臥位では静脈圧が低下して、相対的に着圧が強くなります。また、寝ている時のずり下がりなどによるシワが原因で、足がしびれたり、痛んだりする恐れがあります。(4) 長時間装着する場合は、長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害の恐れがありますので、適宜装着しなおしてください。(5) 本製品を折り返して使用しないでください。局部的に着圧が強くなる恐れがあります。(6) 着圧の高いソックスやハイソックスの重ね履きをしないでください。(7) 2枚重ねでの着用をしないでください。(8) 破損(ほつれ、破れなど)がある場合には着用しないでください。(9) 本製品を加工・改造しないでください。
- 使用中・使用後に、皮膚に異常があらわれた時にはすぐに使用を中止して医師にご相談ください。
(1) つけ心地が悪いなど違和感がある場合。(2) 装着部位にケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれ、発赤、かゆみ、皮膚潰瘍などの症状が生じた場合。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
膝下から足首までが段階着圧設計で、膝下から足先までを覆う編立て加工の underwear
- 組成
ポリエステル、ナイロン、綿、アクリル、ポリウレタン



※【使用目的又は効果】

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング(腕用の弾性スリーブも含む)である。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

※【使用方法等】

1 つま先部分
踵部分
つま先部分(内側にある)

2 つま先部分

3 両手の親指をソックスと足の間に、半円を描くように動かしながら少しずつ引き上げていきます。

4 全部上まで引き上げたら、つま先、かかとの位置を合わせ、シワ等が発生しないように全体を均等に伸ばしてください。

ソックスの中に手を入れて、かかとから先の部分を中に残して裏返しにします。

裏返したソックスに、つま先からかかとの位置まで、しっかり足をさし入れます。そして、裏返しになっているソックスの上部を持って元に戻しながら、かかとから足首まで通します。

<着用時のポイント>

●ねじれ、たるみ、シワができないようにしてください。●縦方向に引き上げるだけでは、長すぎたり、ずり下がる原因になります。幅方向に均等に伸ばしながら着用してください。

【保守・点検に係る事項】

- 水や汗に濡れたまま、長時間放置しないでください。●洗濯ネットを使用してください。
- 色物は他の物と一緒に洗濯しないでください。●タンブラー乾燥はお避けください。
- 製品に使用されている素材は、使用回数とともに徐々に劣化していきます。また、ポリウレタンを使用しておりますので、ポリウレタンの素材特性上、使用の有無に関わらず3~5年で劣化する場合があります。
- 製品に何らかの疑問や機能上の不具合が生じた場合には、取扱店、またはゴールドウインカスタマーサービスセンターにご相談ください。



株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター フリーダイヤル ☎0120-307-560
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日および、弊社指定休業日を除く) 〒150-8517 東京都渋谷区松涛 2-20-6

【包装】

1足単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】 株式会社ゴールドウイン 富山県小矢部市清沢 210 番地
【製造業者】 株式会社タイコー