

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング JMDNコード:31724000
ゴールドウイン コンプレッションロングタイツ

【警告】

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用にならないでください。
 - (1) 重度の血行障害、うっ血性心不全および有痛性青股腫、感染性静脈炎、装着部位に極度の変形を有する方。(2) 現在、装着部位に傷や炎症がある方。
- 次の方は着用前に医師にご相談ください。
 - (1) 深部静脈血栓症の方。(2) 血圧の高い方、心臓などの血行に障害のある方。(3) 装着部位に神経障害をお持ちの方。(4) 糖尿病の方。(5) 繊維に対して過敏症のある方、かぶれやすい体質の方。(6) 妊娠中または妊娠していると思われる方。(7) 高齢の方。
- 次のことを必ず守って正しくお使いください。
 - (1) 適切な圧力を得るために、正しいサイズをお選びください。(2) 就寝時には着用しないでください。立位姿勢を元に設計されています。臥位では静脈圧が低下して、相対的に着圧が強くなります。また、寝ている時のずり下がりなどによるシワが原因で、足がしびれたり、痛んだりする恐れがあります。
 - (3) 長時間装着する場合は、長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害の恐れがありますので、適宜装着しなおしてください。(4) 本製品を折り返して使用しないでください。局部的に着圧が強くなる恐れがあります。(5) 着圧の高いソックスやハイソックスの重ね履きをしないでください。(6) 2枚重ねでの着用をしないでください。(7) 破損(ほつれ、破れなど)がある場合には着用しないでください。(8) 本製品を加工・改造しないでください。
- 使用中・使用後に、皮膚に異常があらわれた時にはすぐに使用を中止して医師にご相談ください。
 - (1) つけ心地が悪いなど違和感がある場合。(2) 装着部位にケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれ、発赤、かゆみ、皮膚潰瘍などの症状が生じた場合。

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

接着加工で段階着圧設計を基にした腰から足首までを覆う下衣

2. 組成

<本体> ナイロン 74%、ポリウレタン 26%


<ウエスト部分> ポリエステル 88%、ポリウレタン 7%、ナイロン 5%

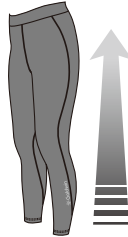

【使用目的又は効果】

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング等(腕用の弾性スリーブも含む。)である。末梢から中枢に向かい漸次的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

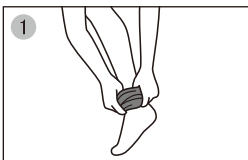

タイツを小さくまとめてから足を通します。



すそをくるぶしの上の位置に合わせてから、両手の親指を内側に入れ、一気に引っ張り上げずに、半円を描くように幅方向へ均等に伸ばしながら徐々に引き上げます。



ふくらはぎにフィットさせながら、左右交互にひざまで引き上げます。



タイツを太ももの周囲にフィットさせるように引き上げ、股下にすき間ができないようにしっかり引き上げてください。



股下のフィッティングを確認したら、ウエスト部分までしっかり引き上げてください。

<着用時のポイント>

●ねじれ、たるみ、シワができないようにしてください。●一般のロングタイツのように、引き上げるだけでは長すぎたり、ずり下がる原因になります。幅方向に均等に伸ばしながら着用してください。

【保守・点検に係る事項】

<洗濯時のご注意>

- 水や汗に濡れたまま、長時間放置しないでください。
- 色物は他の物と一緒に洗濯しないでください。

<ロゴプリント・装着部位に関するご注意>

- プリントされているロゴがはがれることがあります。製品の異常ではありませんのでご安心ください。段階的着圧機能を妨げないよう、意図して強力なプリントを避けています。
- はっ水剤、冷却剤、消炎鎮痛剤、消毒液等、アルコール系溶剤(エタノール・イソプロピルアルコール等)を含むスプレーは、接着・プリント等の剥がれの原因となりますのでお避け下さい。



洗濯ネット使用

<修理のご案内>

破損(ほつれ、破れ等)が生じた場合には、修理を承ります。

- 通常の使用において機能が損なわれたり、破損した場合は製品の機能回復に対して最良の方法を検討し、当社基準価格にて修理をさせていただきます。
- ご要望に確実に応えるために、汚れのひどい製品は一度洗濯してから修理にお出ください。汚れのひどい場合のみ、弊社でクリーニングを行う場合がございますが、その際には別途クリーニング料を加算させていただきます。
- 製品に使用されている素材は、使用回数とともに徐々に劣化していきます。また、ポリウレタンを使用しておりますので、ポリウレタンの素材特性上、使用の有無に関わらず3～5年で劣化する場合があります。使用頻度・期間等にもよりますが、素材が劣化してしまった製品については補修することはできません。また、補修箇所によっては機能性を回復できず、修理が不可能な場合もございます。あらかじめご了承ください。
- 製品に何らかの疑問や機能上の不具合が生じた場合には、取扱店、またはゴールドウインカスタマーサービスセンターにご相談ください。

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター フリーダイヤル ☎0120-307-560

〒150-8517 東京都渋谷区松涛 2-20-6

【包装】

1 着単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】 株式会社ゴールドウイン 富山県小矢部市清沢 210 番地

【製造業者】 島原ソーイング株式会社
株式会社ミヤモリ
株式会社アクトリ