

医療用品04整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

ReD リカバリーウェア（ベア天竺）

【禁忌・禁止】

- ・ 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- ・ 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じたら、ご使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

寸法（単位：cm／公差：±10％）

* ■ メンズ Vネックインナー半袖



	3S	SS	S	M	L
チェスト	65~72	72~80	80~88	88~96	96~104


	LL	3L	4L	5L
チェスト	104~112	112~120	120~128	128~136

■ メンズ Vネックインナー半袖 肩コリ改善



	S	M	L	LL	3L
チェスト	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120


* ■ メンズ ロングボクサーパンツ

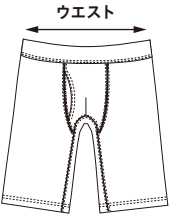

	SS	S	M	L
ウエスト	60~68	68~76	76~84	84~94

	LL	3L	4L	5L
ウエスト	94~104	104~114	114~124	124~134

■ メンズ ロングボクサーパンツ 腰コリ改善

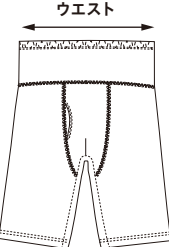

	S	M	L	LL	3L
ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104	104~114

* ■ レディース Uネックインナー半袖



	SS	S	M	L
バスト	65~73	72~80	79~87	86~94


	LL	3L	4L
バスト	93~101	100~108	107~115

■ レディース Uネックインナー半袖 肩コリ改善



	S	M	L	LL	3L
バスト	72~80	79~87	86~94	93~101	100~108


* ■ レディース オーバーパンツ

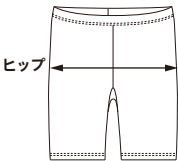

	SS	S	M	L
ヒップ	77~85	82~90	87~95	92~100

	LL	3L	4L
ヒップ	97~105	102~110	107~115

■ レディース オーバーパンツ 腰コリ改善

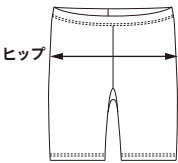

	S	M	L	LL	3L
ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105	102~110

* ■ メンズ Vネックインナー長袖



	3S	SS	S	M	L
チェスト	65~72	72~80	80~88	88~96	96~104

	LL	3L	4L	5L
チェスト	104~112	112~120	120~128	128~136


* ■ メンズ Vネックインナー長袖 肩コリ改善



	S	M	L	LL	3L
チェスト	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120

ご使用前に必ずこの文書をお読みください


*■ メンズ タイツ

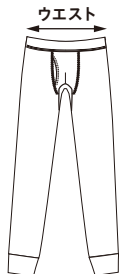

	3S	SS	S	M	L
ウエスト	54~62	60~68	68~76	76~84	84~94

	LL	3L	4L	5L
ウエスト	94~104	104~114	114~124	124~134

*■ メンズ タイツ 腰コリ改善

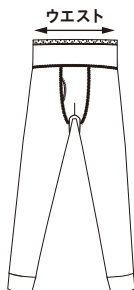

	S	M	L	LL	3L
ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104	104~114

*■ レディース Uネックインナー長袖



	SS	S	M	L
バスト	65~73	72~80	79~87	86~94

	LL	3L	4L
バスト	93~101	100~108	107~115

*■ レディース Uネックインナー長袖 肩コリ改善



	S	M	L	LL	3L
バスト	72~80	79~87	86~94	93~101	100~108

*■ レディース レギンス



	SS	S	M	L
ヒップ	77~85	82~90	87~95	92~100

	LL	3L	4L
ヒップ	97~105	102~110	107~115

*■ レディース レギンス 腰コリ改善



	S	M	L	LL	3L
ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105	102~110

2. 原理

本品は繊維の原材料に高純度セラミックを練りこむことで、体熱等を伝導及び吸収し、一定程度の遠赤外線を輻射し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリ等の症状改善を行うことを目的とした衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】

〔遠赤外線による血行促進作用〕

1. 血行促進
2. 疲労回復
3. 肩コリの改善
4. 腰コリの改善
5. 筋肉のハリ・コリ緩和
6. 筋肉の疲労軽減

【使用方法等】

本品は繰り返し使用可能です。

- ・ 本品に破損がないことを確認してください。
- ・ 衣類として着用してください。
- ・ 日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能です。
- ・ 本品の効果には個人差があるため、長期間の着用が望ましいです。
- ・ 本品は素肌の上に直接着用してください。

【使用上の注意】

- ・ 体質などにより、着用時に異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- ・ 濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- ・ 洗濯の時は、ネットをご使用ください。
- ・ 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれたりする場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 濃色は洗濯で色落ち、色移りする可能性がありますので、他のものと分けて洗濯してください。
- ・ 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- ・ タンブラー乾燥は、お避けください。
- ・ スチームアイロンのご使用はお避けください。
- ・ プリント部分へのアイロンはお避けください。
- ・ 素材の特性上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除いてください。
- ・ 本品の医療機器効能効果は上下セット着用時のものとなります。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- ・ しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

【耐用期間】

2年

【取扱い上の注意】

- ・ 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 MTG

【販売業者】

株式会社 MTG

電話：0120-813-619