

器 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器  
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000

## イヴ・マンドレル

### 【形状、構造及び原理等】

形状：頭部 3.0mm、全長 47mm、軸径 2.3mm

### 【使用目的又は効果】

研削、研磨用のディスク、ホイール等を取り付けるシャフト。  
「イヴ・フレックスピン」専用。

### 【使用方法等】

- 1) チェック部に「イヴ・フレックスピン」を取り付ける。
- 2) これを歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 3) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 4) 回転させた本品を歯科補綴物等に押し当て、研磨を行う。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

### 【使用上の注意】

- ①15,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-763-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

(EVE Ernst Vetter GmbH)

国 名：ドイツ