

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

アルデンテ カービング・ワックス

【形状、構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
その他

硬さの違いにより、以下の 2 種がある。

- ・レギュラー
- ・ハード

色調の違いにより、レギュラー、ハードそれぞれに以下の 4 色
がある。

- ・グリーン
- ・グレー
- ・アイボリー
- ・ブルー

外国製造所：アルデンテ デンタルプロダクト
al dente dentalprodukte GmbH
国 名：ドイツ

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用
いる。

【使用方法等】

- 1) 模型材の表面に分離材を塗布する。
- 2) 加熱した歯科技工用インストルメント等を用いて、本品を
軟化・熔融させ、これを模型上に盛り上げる。
- 3) 室温で放冷後、歯科技工用インストルメント等により彫刻
し、形態を整えて、ろう型を作製する。
- 4) 以下、ロストワックス法により鑄造を行い、固定式補綴修
復物を得る。

【使用上の注意】

- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注
意すること。
- ②本品は、【使用目的】に記載した用途以外には使用しないこ
と。
- ③他の製品と混用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温にて保管すること。
- ・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所
など)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管
しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net