

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

CNコバルト・ポリッシャー

【形状、構造及び原理等】

	形 状
スティック	直径 6.4mm、長さ 22.2mm
ホイール	直径 22.2mm、厚さ 3.2mm

砥粒の粒度の違いにより、スティック、ホイールそれぞれにコース、ミディアム、ファインの 3 種がある。

	用 途
コース	荒研磨用
ミディアム	中研磨用
ファイン	仕上げ研磨用

組成：炭化けい素、合成ゴム、その他

【使用目的又は効果】

ゴム基材に炭化けい素研削材を含有し、ポイント状、ホイール状の形態をもつ研磨材。
コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金等の硬質歯科用金属の研磨に用いる。

【使用方法等】

中心部にマンドレルを取り付け、これを歯科技工用ハンドピース等に装着して用いる。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①以下の回転数を超えて使用しないこと。
スティック：20,000rpm
ホイール：15,000rpm
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072(966)4180

F A X 番号：072(963)4182

E・M a i l：info@come-nets.net

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社