

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNチャモイス HP

【形状、構造及び原理等】

形状：直径 20mm、厚さ 5mm

【使用目的又は効果】

補綴物等のつや出し研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に取り付けて用いる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ① 10,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

**製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社