

歯07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN70893000

CNパラフィンワックス

【形状、構造及び原理等】

形状: 板状(厚さ1.4mm)
主成分: パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス

【使用目的又は効果】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いる。

【品目仕様等】

物理的性質

凝固点		59.1℃
加圧短縮率	21℃	2%未満
	37℃	3%未満
	45℃	50%未満

【使用方法等】

ろう操作製手順

- ①板状のワックスを巻き、棒状にする。
- ②棒状のワックスを馬蹄形にして、基礎床に圧接する。
- ③過不足部分は盛ったり、足したり、削ったりし基礎床に圧接していく。

※咬合床の調整、人口歯の排列、ろう義歯の作製は、通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

- ①本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本材は、【使用目的】に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温にて保管すること。
- ・本材を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社カム・ネッツ
住 所: 〒578-0903
大阪府東大阪市今米1-17-12
電 話 番 号: 072(966)4180
F A X 番 号: 072(963)4182
E・M a i l : info@come-nets.net
製 造 元: クエスト デンタルマテリアルコーポレーション
QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION
国 名: フィリピン