

器 49 医療用穿刺器，穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー JMDN16668000

ダイアカーブ FG

【形状、構造及び原理等】

作業部の形態の違いにより、114 種がある。

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもつ。歯牙、骨等の硬組織、並びに金属、コンポジットレジン等の研削に用いる。

【使用方法等】

歯科用ハンドピース等に装着して用いる。

- 1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- 2) 歯科用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を被研削物に押し当て、研削、研磨を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め患者の口腔外で予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 歯髄為害防止のため、注水下にてソフトタッチ（フェザータッチ）で使用する。

【使用上の注意】

- ①350,000rpm の回転数を超過して使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外 国 製 造 所：ダイアスイス

DIASWISS SA

国 名：スイス