

歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## CNウルトラブラシ

---

### 【形状、構造及び原理等】

形状：中心軸部からナイロン製フィラメントを植立させたブラシ状研磨材。フィラメントの植立量により、以下の 3 種がある。

- 1 行…直径 48mm
- 2 行…直径 70mm
- 3 行…直径 70mm

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。主にスルホン床又はレジン床義歯のレーズ研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科技工用レーズに装着して用いる。

### 【使用上の注意】

- ①3,400rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net