

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNダイヤモンドポリッシュペースト

【形状、構造及び原理等】

形状：ペースト状

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。主に陶材、硬質レジンの研磨に用いる。

【使用方法等】

本品を補綴物に塗り、バフ等で研磨をする。

【使用上の注意】

- ①目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ②本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ③本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社