

*2017 年 11 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2014 年 07 月 01 日改訂（第 2 版）

2014 年 05 月 01 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：27B2X00281000047

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

CNフレキシディップワックス

【形状、構造及び原理等】

主成分：マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

【使用方法等】

ディッピング法

- ①模型材の表面に分離材を塗布します。
- ②本品をワックスポット等で融解し（約 90℃）、支台歯にコーピングしてください。

ワックスアップ法

- ①模型材の表面に分離材を塗布します。
- ②熱したインスツルメント等を使い、本品を支台歯に一層盛り上げてコーピングしてください。

【使用上の注意】

- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本品は、【使用目的】に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③他の製品と混用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温にて保管すること。
- ・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1-17-12

電 話 番 号：072(966)4180

F A X 番号：072(963)4182

E・M a i l：info@come-nets.net

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社