

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CN布バフ レーズ用

【形状、構造及び原理等】

形状：直径 80mm、厚さ 10mm

【使用目的又は効果】

補綴物等のつや出し研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用レーズ等に取り付けて用いる。

【使用上の注意】

- ①3,400rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷のあるものは使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E - M a i l : info@come-nets.net

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社