

2017 年 11 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2014 年 07 月 01 日改訂（第 2 版）

2014 年 05 月 01 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：27B2X00281000051

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNカムピカ

【形状、構造及び原理等】

成分：アルミナ微粉、プロピレングリコール、その他

【使用目的又は効果】

補綴物等のつや出し研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用金属、義歯床、硬質レジン等の技工物に塗り、布パフ等で研磨、艶出しをする。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品の使用中は、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ②本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ③本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社