

2017 年 11 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2014 年 07 月 01 日改訂（第 2 版）

2014 年 05 月 01 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：27B2X00281000056

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

CNラバー・ディスク

【形状、構造及び原理等】

形状：直径 23.0mm、厚さ 1.0mm のディスク状。

【使用目的又は効果】

ゴム基材に炭化けい素研削材を含有するディスク状の形態をもつ研磨材。

クラウン、ブリッジの隣接面等の細部研磨に用いる。

【使用方法等】

中心部にマンドレルを取り付け、これを歯科技工用ハンドピース等に装着して用いる。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ① 10,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤ 本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1-17-12

電話番号：072(966)4180

FAX 番号：072(963)4182

E-Mail：info@come-nets.net

*製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社