

2017 年 11 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2014 年 07 月 01 日改訂（第 2 版）

2014 年 05 月 01 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：27B2X00281000070

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNポリプレシャインブラシ

【形状、構造及び原理等】

形状：中心軸部から羊毛製フィラメントを植立させたブラシ
状研磨材。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用レーズ等に取り付け、回転させる。
- 2) 補綴物を本品に軽く押し当て、研磨する。

【使用上の注意】

- ①3,400rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社