

2017年11月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2014年07月01日改訂（第2版）

2014年05月01日作成（新様式第1版）

届出番号：27B2X00281000074

歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## CNパットホイール

### 【形状、構造及び原理等】

形状：直径25mm、厚さ5mmのホイール状。  
シリコーンゴムの含浸量の違いにより、ソフト、ハードの2種がある。

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。  
主にスルホン床又はレジン床義歯の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

中心部にマンドレルを取り付け、これを歯科技工用ハンドピース等に装着して用いる。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用すること。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

### 【使用上の注意】

- ①8,000rpmの回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ  
住 所：〒578-0903  
大阪府東大阪市今米1丁目17番12号  
電 話 番 号：072-966-4180  
F A X 番 号：072-963-4182  
E・M a i l：info@come-nets.net  
\*製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社