

歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN70891000

シリコンパテ C65

【形状、構造及び原理等】

C	性 状	成 分
主剤	パテ状 白 色	ジヒドロキシポリシロキサン、二酸化ケイ素、流動パラフィン、その他
硬化剤	ペースト状 赤 色	有機錫化合物、ケイ酸エステル、その他

【使用目的又は効果】

技工用のコア用印象材として使用する。

【使用方法等】

練和時間：1 分

操作時間：2～3 分（練和時間含む）

硬化時間：5～7 分

- ①主剤を付属の計量器ですり切り一杯（約 21g）取ります。手のひら又は紙練板上に軽く押し広げ、計量器の縁を軽くあてて円の形をつけます。
- ②硬化剤をチューブの口径と同じ太さで約 2.5cm 出します。（この時チューブの先がベースに触れないように注意します）
- ③硬化剤を包み込むようにして、主剤の白色と硬化剤の赤色が均一に混ざるように 30 秒～60 秒で練和します。
- ④練和物を模型等の片面より気泡の入らないように注意深く圧接します。出来るだけ均一な厚みになるように目標の全面を覆います。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1）硬化剤は、常に一定の太さに出すこと。
- 2）硬化剤は空気に触れるとゲル化しやすいため、採取後はすみやかに密栓すること。
- 3）硬化剤を長時間使用しない場合、ノズル部分で固くなることがあるので、取り除き、清掃してから使用すること。
- 4）気温が高くなると、操作時間が短くなるので注意すること。
- 5）気温が低いときは硬化が遅くなるので注意すること。
- 6）皮膚の弱い方は、練和時にハンドクリームまたはポリ手袋を使用すること。

【使用上の注意】

- ①他の製品と混用しないこと。
- ②本材は技工用のコア印象材です。口腔内の印象用には使用しないこと。
- ③本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ④本剤の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ⑤本材が、万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、火気を避け、常温（15～25℃）で保管すること。
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1－1 7－1 2

電 話 番 号：072(966)4180

F A X 番号：072(963)4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外 国 製 造 所：メガデンタル

megadental GmbH

国 名：ドイツ