

器 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000

CNマンドレールHP

【形状、構造及び原理等】

形状：頭部 8.0mm、全長 47.5mm、軸径 2.3mm

【使用目的又は効果】

研削、研磨用のディスク、ホイール等を取り付けるシャフト。

【使用方法等】

頭部に研削・研磨用のディスク、ホイール等を取り付け、これを歯科技工用ハンドピース等に装着して用いる。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ①ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャフトを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ②予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- ①指定（本品に取り付ける製品の被包又は説明書に記載）の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形（表面キズ、曲がり）等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

外国製造所：メガデンタル

(megadental Vertrieb GmbH)

国 名：ドイツ