

器 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000

イヴ マンドレル61HP

【形状、構造及び原理等】

形状：全長 48mm、軸径 2.3mm

【使用目的又は効果】

研削、研磨用のスティック等を取り付けるシャフト。

【使用方法等】

- ①本品の頭部に研削、研磨用のスティックを取り付ける。
- ②本品の軸部を歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- ③歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させ、歯科技工物等の研削・研磨を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ①ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ②予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- ①指定(本品に取り付ける製品の被包又は説明書に記載)の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-763-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

EVE Ernst Vetter GmbH

国 名：ドイツ