

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

CNグラインダーディスク

【形状、構造及び原理等】

形状：直径 25.0mm、厚さ 3.0mm のホイール状。

【使用目的又は効果】

アルミナ質研削材を含有し、ホイール状の形態をもつ研削材。
歯科用金属の荒削りに用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品の中心部にマンドレルを取り付ける。
- 2) これを歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 3) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 4) 回転させた本品を技工物に押し当て研削を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用すること。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①20,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネット

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1-17-12

電話番号：072(966)4180

FAX番号：072(963)4182

E-Mail：info@come-nets.net

外国製造所：レコデント インターナショナル

Reco-Dent International Co., Ltd.

国 名：台湾