

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

CNインレー：ワックス

【形状、構造及び原理等】

形状：棒状

色調：グリーン（ハード）・バイオレット（ソフト）

主成分：パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス

物理的性質

グリーン

バイオレット

温度	加圧短縮率
30℃	2.0%未満
40℃	4.0%未満
45℃	10.0%未満

温度	加圧短縮率
30℃	3.0%未満
40℃	6.0%未満
45℃	60.0%未満

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴物のろう型作製のキャスティングワックス。

【使用方法等】

- ① 技工用ガスバーナー、電気ポット等により本品を軟化・溶融させる。
- ② 適量を取り出し、模型上に盛り上げ、ろう型を作製する。
- ③ 以下、ロストワックス法により鑄造を行い、固定式補綴修復物を得る。

【使用上の注意】

- ① 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ② 本品は【使用目的】に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 室温にて保管すること。
- ・ 本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネット

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1-17-12

電話番号：072(966)4180

FAX番号：072(963)4182

E-Mail：info@come-nets.net

外国製造所：クエスト デンタルマテリアルコーポレーション

QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION

国 名：フィリピン