

歯 06 歯科用印象材料
 一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN70891000

メガシリコーン

【形状、構造及び原理等】

構成名	性状	成分
主 剤	液状 ピンク	オルガノポリシロキサン、その他
硬化剤	液状 ホワイト	オルガノポリシロキサン、その他

【使用目的又は効果】

シリコーンゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

【使用方法等】

- ①複模型用のフラスコを用意する。
- ②主剤と硬化剤を1：1の割合でスパチュラ等で均一な色調になるまで約1分間練和する。
- ③フラスコより 20～30cm くらいの高さから一方向より途切れないように少しずつ流し込む。
- ④約 30 分で硬化する。
- ⑤硬化を確認して、マスターモデルを取り出す。
- ⑥硬化した本材の印象面に、界面活性剤等を薄く吹きつけ、完全に乾く前に模型材を注入する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 成分が沈殿することがあるので、使用前に容器ごとゆっくりと回転させて、よく混合すること。
- 2) 気温が高くなると、操作時間が短くなるので注意すること。
- 3) 気温が低いときは、硬化が遅くなるので注意すること。
- 4) 下記の材料と併用すると、硬化不良や硬化の遅れをおこすことがある。

ブロックアウト用油粘土、ラテックス系ゴム手袋、縮合型シリコーン印象材、ポリサルファイドラバー系印象材、ユージノール系材料、未硬化の義歯床用レジン、未硬化の常温重合レジン、未硬化のコンポジットレジン、未硬化の瞬間接着剤、輪ゴム、グリセリン、ハンドクリーム、模型の消毒剤

【使用上の注意】

- ①他の製品と混用しないこと。
- ②本材は複模型作製以外には使用しないこと。
- ③本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ④本材が、万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、冷暗所で保管すること。
- ・主剤と硬化剤が混入しないよう注意すること。キャップの取り違えにより、容器中で本材が硬化することがある。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

外国製造所：メガデンタル

(megadental GmbH)

国 名：ドイツ