

*2017 年 11 月改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2015 年 06 月 8 日改訂（第 2 版）

2014 年 05 月 01 日作成（新様式第 1 版）


届出番号：27B2X00281000104

器 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN35794000

ワックスカービングペンシル

【形状、構造及び原理等】

構造

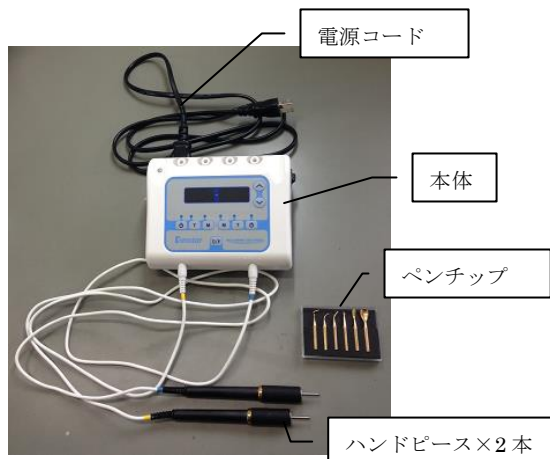

本体寸法：W152×D123×H70mm

ハンドピース：120×12mm

電源：AC100V

設定温度：50～200℃

に中止すること。

④ 故障の原因となるので、改造、分解をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・高温・多湿・水のかからない場所を避けて保管すること。
- ・本品を使用しない時は電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いておくこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 17 番 12 号

電 話 番 号：0800-600-1180

F A X 番 号：0800-600-1182

E・M a i l：info@come-nets.net

*外国製造所：デンスター

Denstar Co.,Ltd.

国 名：大韓民国

【使用目的又は効果】

本品は、ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

- 1) コードのねじれ、傷等がないか確認し、説明書のとおり接続する。
- 2) プラグをコンセントに差し込み、電源を ON にする。
- 3) 温度調節ボタンを押して希望の温度に合わせる。
- 4) ヒーター通電時は本体液晶画面に設定温度が表示されるので、確認のうえ作業を行う。
- 5) 加熱されたペン先でワックスを軟化させて形成を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ① 故障の原因となるので、専用の電源コード及びハンドピース以外は接続しないこと。
- ② 使用時、使用直後はペン先が高温になっているので火傷に注意すること。
- ③ 作業終了後または作業中断時は必ず電源を OFF にすること。

【使用上の注意】

- ① 本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③ 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を直ち