

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNロビンソンブラシ

*【形状、構造及び原理等】

成分： 作業部…動物毛
軸部…ステンレス鋼
形状：

種類		成分	全長	作業部直径
No.9	ソフト	山羊毛	43mm	14mm
	ミディアム	馬毛	43mm	14mm
	ハード	馬毛	43mm	14mm
	エクストラハード	豚毛	43mm	14mm
No.11	ソフト	山羊毛	43mm	17.5mm
	ミディアム	馬毛	43mm	17.5mm
	ハード	馬毛	43mm	17.5mm
No.12	エクストラハード	豚毛	43mm	19mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ
住 所：〒578-0903
大阪府東大阪市今米 1 丁目 17 番 12 号
電 話 番 号：072-966-4180
F A X 番 号：072-963-4182
E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：ペンタル エターナ ブラシ & ツールズ メイキング社
PENTAL ETERNA BRUSHES & TOOLS
MAKING CO., LTD.

国 名：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

歯科補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用ハンドピース等に取り付ける。
- 2) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を被研磨物に軽く押し当て研磨する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①過度の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的付加）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。