

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

CNコットン・ホイール

【形状、構造及び原理等】

形状：作業部直径 22mm

【使用目的又は効果】

歯科補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用ハンドピース等に取り付ける。
- 2) 本品の作業部に研磨材を塗布する。
- 3) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 4) 回転させた本品を被研磨物に軽く押し当て研磨する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①20,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ⑦本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 17 番 12 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：ペンタル エターナ ブラシ & ツールズ メイキング社

PENTAL ETERNA BRUSHES & TOOLS
MAKING CO., LTD.

国 名：中華人民共和国