

器 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDN 35079001

CNピンセット

【形状、構造及び原理等】

外観

メリウムピンセット（先端ギザあり）



先端ギザあり



先端ギザなし



原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

2つの先細の先端部で目的物を挟んで把持するための器具。

【品目使用等】

バリ、破損、傷、ヒビ、曲がり、変形、腐食等の異常がないこと。

物体を保持する2つの保持面は平坦であり、面は合致し、かつ力を加えたときかみ合わせがずれないこと。

【使用方法等】

片手で把持し、親指、人差し指等を用いて握ると2つの保持面は閉じる。握る力を弱めると開く。

使用前に必ず滅菌する。（オートクレーブ 132℃）

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ① 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③ 破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ④ 破損、事故の原因になるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工を行わないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用中に感作またはアレルギー反応があらわれた場合には、直ちに使用を中止し専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。

と。

- ・ 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ・ 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用前・使用後に汚れ、破損、変形、変色、腐食、可動部の動き等異常がないか点検すること。
- ② 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ③ 洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ④ 次亜鉛酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロヘキシジン、超酸性水等の機能水、家庭用洗剤は腐食（錆）を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ⑤ 薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類により金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。また、長期間の浸漬は避けること。
- ⑥ 洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で鏡面曇りや金属腐食を起こすことがある。
- ⑦ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥により変質、変色が生じることがある。
- ⑧ EOG ガス滅菌は金属を腐食させるおそれがあるので使用しないこと。
- ⑨ 腐食及び錆びの原因となるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシ等は使用しないこと。
- ⑩ 超音波洗浄器等での洗浄する場合、先端同士が接触して先端使用部が損傷しないよう注意すること。また、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- ⑪ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネット

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：0800-600-1180

F A X 番 号：0800-600-1182

外国製造所：ORMON ENTERPRISES INC.

国 名：パキスタン