

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

イヴ プロフィークリーン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

成分：メタクリル樹脂、ガラス微粒子

種類：コース、ミディアム



PC-100 PC-101 PC-102 PC-103 PC-111

【使用目的又は効果】

本品は歯面、または補綴物の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- 2) 歯科用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を歯面、補綴物等に軽く押し当て研磨を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 本品の使用後は滅菌を施し保管する。

【使用上の注意】

- ① 10,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 冷却水を注水しながら使用すること。
- ③ 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ④ 本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・滅菌済の本品を保管する場合、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。

【保守点検に係る事項】

- ① 本品の使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。
- ② 使用前・使用後は刃部に破損、ヒビ、傷などがないか確認すること。これらのような異常が見られた場合は、使用を中止し廃棄すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電話番号：072-966-4180

FAX 番号：072-763-4182

E-Mail：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

(EVE Ernst Vetter GmbH)

国名：ドイツ