


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

イヴ ダイアコンプ ウルトラ

【形状、構造及び原理等】

成分： 作業部…アルミナ質研削材、合成ゴム
軸部…ステンレス鋼

形状： 作業部の形状の違いにより 5 種がある。
軸部の形状の違いにより、RA 用、FG 用の 2 種がある。

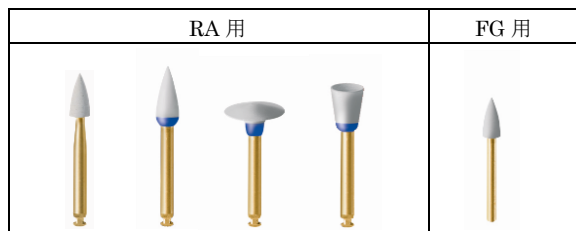

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-763-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

(EVE Ernst Vetter GmbH)

国 名：ドイツ

【使用目的又は効果】

ゴム基材にアルミナ質研削材を含有するポイント状の形態をもつ研磨材。コンポジットレジン等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用ハンドピース等に装着する。
- 2) 歯科用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 3) 回転させた本品を被研磨物に押し当て、研磨を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①10,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。