

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN35768000

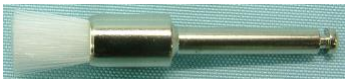
## CNプロフィーブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】  
・再使用禁止

【販売名】  
CNプロフィーブラシ

【形状、構造及び原理等】  
成分：ブラシ部…ナイロン  
軸部…ステンレス鋼

| スクリュータイプ                                                                            | 型番   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 2112 |
| RA用                                                                                 | 型番   |
|  | 2113 |
|  | 2114 |
|  | 2115 |

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科衛生士、歯科医師が歯の清掃と研磨に用いるブラシを備えた回転式歯科用器具である。歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を適用する。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- 2) 本品に十分な研磨ペーストを付ける。
- 3) 回転させた本品を歯全体に軽く押し当てて研磨を行う。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れないことを確認すること。
- 3) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 本品を歯面にあてた後、回転させること。口腔外で回転させるとプロフィーペーストが飛び散ることがある。
- 5) スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、必ず正（右）回転で使用する。

### 【使用上の注意】

- ① 再使用禁止。
- ② 指定の回転数を超過して使用しないこと。
- ③ 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと
- ④ 本品は、【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ  
住 所：〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目17番12号  
電 話 番 号：072-966-4180  
F A X 番 号：072-963-4182  
E・M a i l：info@come-nets.net  
外国製造所：レコデント インターナショナル  
(Reco-Dent International Co., Ltd.)  
国 名：台湾