

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

CNヒートレスホイール

【形状、構造及び原理等】

形状：ホイールの直径、厚さの異なる以下の 9 種がある。

No.	直径（mm）	厚さ（mm）
#1	25.4	4.8
#2		3.1
#3		2.4
#4	22.2	4.8
#5		3.1
#6		2.4
#7	19.1	4.8
#8		3.1
#9		2.4

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-763-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

（EVE Ernst Vetter GmbH）

国 名：ドイツ

【使用目的及び効果】

炭化けい素を含有し、ホイール状の形態をもつ研削材。
歯科用金属の荒削りに用いる。

【使用方法等】

中心部にマンドレルを取り付け、これを歯科技工用ハンドピース等に装着して用いる。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ① 20,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤ 本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。