

歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## ダイアシャイン

### 【形状・構造及び原理等】

成分：ダイヤモンド粉末、ラノリンオイル、その他

形状：ペースト状

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材。

歯科用金属、硬質レジン、ジルコニアセラミック、陶材等の  
つや出し研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を技工用ハンドピース又は技工用レーズに取り付けた  
パフホイール又はブラシ等に押しあて塗布する。
- 2) 本品を塗布したパフホイール又はブラシ等を、補綴物の表  
面に軽く押しあてながら仕上げ研磨をする。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ・ 本品の使用中は、目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
  - ・ 本品は【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ・ 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
  - ・ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ・ 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1-17-12

電 話 番 号：072(966)4180

F A X 番 号：072(963)4182

E・M a i l : info@come-nets.net

外国製造所：ダイアスイス

DIASWISS SA

国 名：スイス