

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

イヴ・ツイスト

【形状・構造及び原理等】

成分：作業部…炭化ケイ素、合成ゴム

形状：作業部の大きさの違いにより3種がある。含有する炭化ケイ素の粒度の違いにより、3種それぞれエクストラコース、コース、ミディアム、ファインの4種がある。

タイプ	用途	サイズ厚さ(直径×厚さ)
エクストラコース	荒研磨用	14×1.2mm 17×1.2mm 26×1.2mm
コース	中研磨用(荒)	14×1.2mm 17×1.2mm 26×1.2mm
ミディアム	中研磨用(細)	14×1.2mm 17×1.2mm 26×1.2mm
ファイン	仕上研磨用	14×1.2mm 17×1.2mm 26×1.2mm

【使用目的又は効果】

ゴム基材に炭化ケイ素を含有するブラシ状の形態をもつ研磨材。歯科用金属の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1)本品を2枚重ねにし、中心部にマンドレールを取り付ける。
- 2)これを歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 3)歯科用ハンドピース等により本品を回転させる。
- 4)回転させた本品を被研磨物に軽く押し当て、研磨を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1)ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①12,000rpmの回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐ為に、保護めがね等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は【使用目的】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1-17-12

電話番号：072(966)4180

FAX番号：072(963)4182

E-Mail：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

(EVE Ernst Vetter GmbH)

国 名：ドイツ