

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科用焼石こう JMDN70897020

## アンカーロック

### 【形状、構造及び原理等】

主成分：半水石こう、その他

形状：粉末状

色調の違いにより、イエロー、ブルー、ホワイト、ピンク、  
グリーン、グレーの 6 色がある。

### 【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こう。

主に、石こう模型の作製、ろう義歯のコーティングに用いる。

### 【使用方法等】

- ①本品 100g に対し、水 23mL で練和して下さい。硬化時間は約 10 分です。
- ②練和は 30～60 秒間均一になるまで行います。
- ③歯科用パイプレータ等で振動を与えながら、印象に注入します。
- ④注入後、40～60 分で模型を取り出すことができます。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ①本品を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ②本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどの防具を使用すること。
- ③本品は、【使用目的又は効果】の項の用途以外には使用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### 2) 重要な基本的注意

本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は密閉して保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072(966)4180

F A X 番 号：072(963)4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：ディーケー ムンギョウ コーポレーション

DK MUNGYO CORPORATION

国 名：大韓民国