

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDN70901000

イヴ ファイバーカット

【形状、構造及び原理等】

用途、ディスクの直径、厚さの異なる以下の 8 種がある。

メタル用

FCA22/02…直径 22.0 mm、厚さ 0.2 mm

FCA22/03…直径 22.0 mm、厚さ 0.3 mm

FCA40/05…直径 40.0 mm、厚さ 0.5 mm

ポーセレン用

FCS22/02…直径 22.0 mm、厚さ 0.2 mm

FCS22/03…直径 22.0 mm、厚さ 0.3 mm

FCS25/02…直径 25.0 mm、厚さ 0.2 mm

ジルコニア用

FCD20/02…直径 22.0 mm、厚さ 0.2 mm

FCD20/03…直径 22.0 mm、厚さ 0.3 mm

【使用目的又は効果】

本品は、アルミナ・シリコンカーバイド・合成ダイヤモンドを含有するディスク状の形態をもつ研削材。

歯科用金属等の荒削り、切断に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品の中心部にマンドレルを取り付ける。
- 2) これを歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 3) 歯科技工用ハンドピースにより本品を回転させる。
- 4) 回転させた本品を技工物に押し当て、研削、切断を行う

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ①25,000rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- ⑤本品は、【使用目的】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米 1 丁目 1 7 番 1 2 号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：イヴ

(EVE Ernst Vetter GmbH)

国 名：ドイツ